


Börja här

Kom igång-guide

Besök www.accu-chek.com för att hitta appar för diabeteskontroll som är kompatibla med din mätare.

ACCUCHEK®

Översikt över mätaren

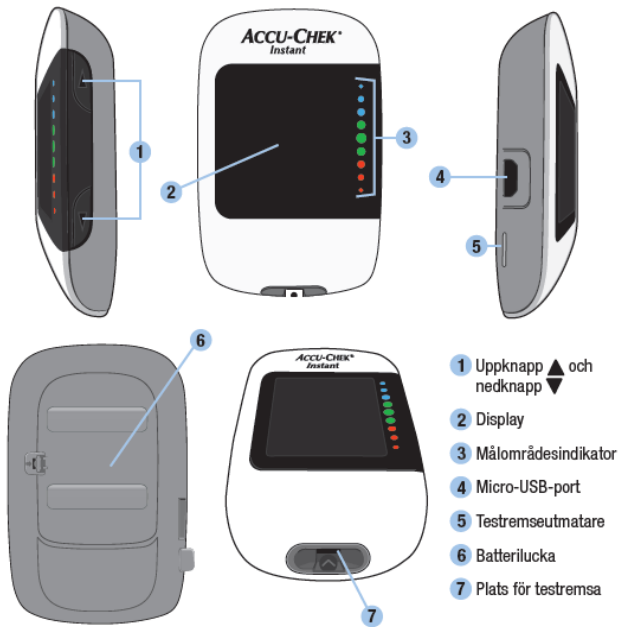

Ställa in tid och datum



Mätaren uppmanar dig att ställa in tid och datum första gången du slår på den. **Set-up** visas på displayen och timtalet blinkar. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska timtalet.




Tryck på och håll ned ▲ för att bekräfta timtalet och gå till nästa fält. Upprepa steg 1 och 2 för att justera varje fält. När du har ställt in året trycker du på och håller ned ▼ tills den blinkande testremsesymbolen visas för att spara inställningarna.


Förbereda blodprovstagaren




Bekanta dig med Accu-Chek Softclix-blodprovstagaren.

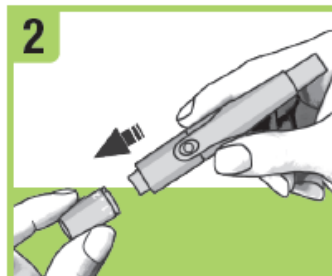


Ta bort kåpan från blodprovstagaren genom att dra kåpan rakt av. Vrid inte kåpan.

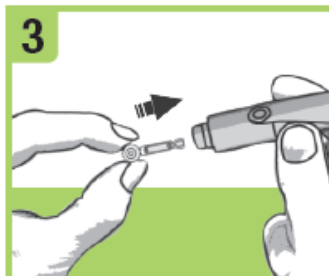

Sätt in en lansett i blodprovstagaren tills den snäpper på plats.

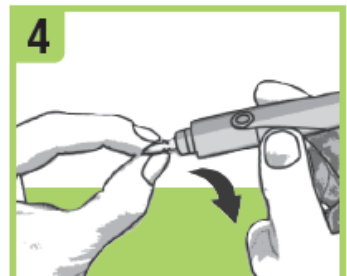

Vrid av skyddskåpan från lansetten.

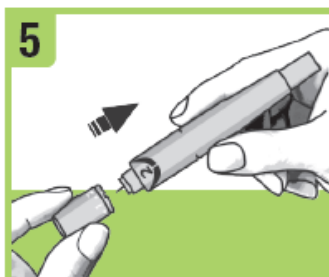

Sätt tillbaka kåpan på blodprovstagaren. Se till att skåran i kåpan ligger i linje med linjen på blodprovstagaren.



Ställ in önskat insticksdjup. Börja med 2. Om du har tjockare hud, ska du välja ett större insticksdjup.




Tryck in laddningsknappen helt, som på exempelvis en kulspetspenna. Tryck inte på avtryckaren samtidigt som du trycker på laddningsknappen.




Avtryckaren blir gul när blodprovstagaren är laddad. Lägg blodprovstagaren åt sidan tills du är redo att sticka dig i fingret.


Utföra ett blodsockertest

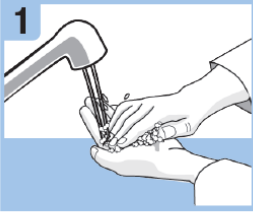


1 Tvätta och torka händerna innan du utför ett blodsockertest.

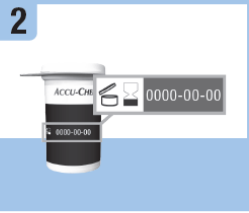


2 Kontrollera utgångsdatumet på testremseburken. Använd inte testresor med passerat utgångsdatum.

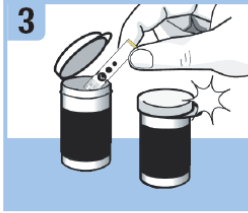


3 Ta ut en testresa ur testremseburken. Förslut testremseburken väl.

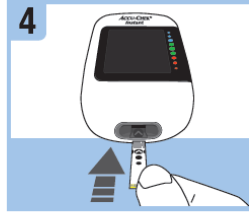


4 Sätt in testresans metallfärgade ände i mätaren.

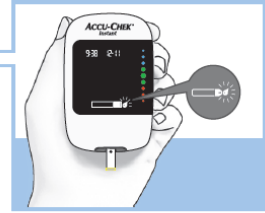


Mätaren slås på. En blinkande droppsymbol visas.

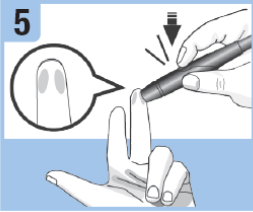


5 Tryck blodprovstagaren hårt mot sidan av fingertoppen och tryck in den gula avtryckaren helt för att sticka dig i fingret.

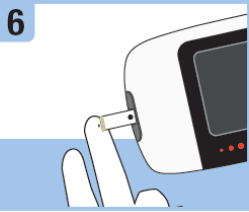


6 För testresans gula ände till bloddroppen. Applicera inte blod ovanpå testresan.

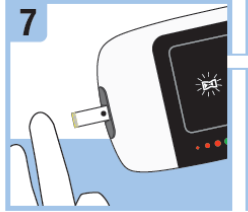

7 Ta bort fingret från testresan när den blinkande timglassymbolen visas. Om du inte tar bort fingret från testresan kan det leda till felaktiga testresultat.

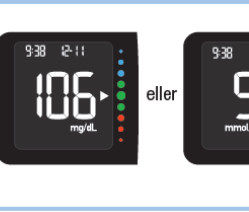

Testresultatet visas på displayen efter mindre än 4 sekunder.

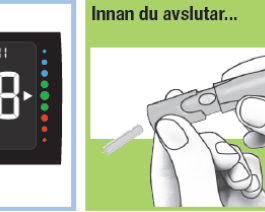

Innan du avslutar...

Ta bort kåpan från blodprovstagaren. Rikta lansetten bort från dig. Skjut utstötaren framåt för att stöta ut lansetten.

Felmeddelanden

ANMÄRKNING

Felkoden och Err blinkar omväxlande på displayen vid alla kodade felmeddelanden (E-1 till och med E 14).

Om något av felmeddelandena nedan visas på displayen vid något tillfälle, ska du omgående läsa avsnittet Felmeddelanden i kapitlet Underhåll och felsökning av mätaren i bruksanvisningen.

E-1 Testresan kan vara skadad, felaktigt isatt eller använd. Ta ur testresan och sätt i den igen eller byt ut den om den är skadad eller använd.

E-3 Det är fel på mätaren eller testresan. Det här felmeddelandet kan visas om testremseburken inte har varit väl försluten. Testresorna kan ha skadats på grund av felaktig lagring eller hantering. **Fatta aldrig behandlingsbeslut baserade på ett felmeddelande.** Upprepa blodsockertestet. Om E-3-felmeddelandet visas en gång till, ska du utföra ett kontrolltest med kontrolllösning och en ny testresa. Läs avsnittet Utföra ett kontrolltest i kapitlet Kontrolltest i bruksanvisningen. Om E-3-felmeddelandet fortsätter att visas, ska du använda en alternativ metod för att testa ditt blodsocker, till exempel en reservmätare och -testresor. Om den alternativa metoden ger ett extremt högt blodsockerresultat eller om ingen alternativ metod finns tillgänglig, ska du kontakta läkaren/diabetesteamet omgående.

I sällsynta fall kan E-3-felmeddelandet indikera att ditt blodsockerresultat är extremt högt och ligger över systemets mätintervall. Läs avsnittet **Ovanliga blodsockerresultat i kapitlet Blodsockertest i bruksanvisningen för information om andra möjliga orsaker till felmeddelandet.**

E-4 Testresan har inte sutit upp tillräckligt med blod eller kontrolllösning för ett test, eller också tillfördes droppen efter att testet hade startat. Kassera testresan och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet.

E-6 Blod eller kontrolllösning tillfördes till testresan innan den blinkande droppsymbolen visades på displayen. Kassera testresan och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet.

E-7 Ett elektroniskt fel uppstod. Ta ur batterierna, tryck på och håll ned en av mätarknapparna i minst 2 sekunder och sätt i batterierna igen. Utför ett blodsocker- eller kontrolltest.

E-8 Temperaturen ligger över eller under det korrekta temperaturområdet för

systemet. Mer information om systemets användningsvillkor finns i bipacksedeln till testresorna. Flytta dig till ett område med de lämpliga villkoren och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet. Mätaren får inte värmas upp eller kylas ned på konstgjord väg.

E-9 Batterierna kan vara slut. Slå på mätaren igen. Om du befinner dig i kall miljö, ska du flytta dig till ett område med en mer måttlig temperatur och upprepa testet. Om meddelandet fortsätter att visas efter flera försök, ska du byta batterierna. Om meddelandet visas igen efter att du har bytt batterierna, ska du ta ur batterierna och trycka på och hålla ned en av mätarknapparna i minst 2 sekunder och därefter sätta i batterierna igen.

E 10 Tid och datum kan vara felaktigt inställda. En blinkande trådlössymbol visas medan mätaren försöker synkronisera tid och datum med den kopplade enheten. När trådlössymbolen inte längre visas trycker du på uppknappen för att stänga av mätaren. Tryck på uppknappen en andra gång tills den blinkande testresesymbolen visas. Om tids- och datumsynkroniseringen inte lyckades uppmanar mätaren dig att ställa in tid och datum nästa gång du slår på den. Läs avsnittet Ställa in tid och datum i kapitlet Ditt nya system i bruksanvisningen.

E 11 Testresan kan vara skadad. Upprepa blodsocker- eller kontrolltestet med en ny testresa.

E 12 Blodprovet kan innehålla en hög halt av askorbinsyra. Kontakta läkaren/diabetesteamet.

E 13 Det kan finnas vätska eller främmande material i platsen för testresan. Ta ur testresan och sätt i den igen eller upprepa blodsocker- eller kontrolltestet med en ny testresa. Kontakta Roche om felet kvarstår.

E 14 Ett elektroniskt fel uppstod. Kontakta Roche.

ANMÄRKNING

Kontakta Roche om felmeddelandet fortsätter att visas.

! VARNING



Förvara nya och använda batterier oåtkomligt för barn. Se bruksanvisningen för ytterligare information.

Den här kom igång-guiden ersätter inte bruksanvisningen till din Accu-Chek Instant-blodsockermätare. Bruksanvisningen innehåller viktiga hanteringsanvisningar och ytterligare information.

Blodprovstagaren är endast avsedd för personligt bruk.

SENASTE REVIDERING: 2020-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT och SOFTCLIX är varumärken som tillhör Roche.

© 2020 Roche Diabetes Care
09291555001(01)-0720



Roche Diagnostics Oy,
Revontulenpuisto 2C
PL 69, 02101 Espoo, FINLAND

ANMÄRKNING

Ha alltid en uppsättning reservbatterier till hands.
Batterilivslängden kan variera beroende på faktorer som till exempel temperatur och batteritillverkare.