


CareSens Dual – mittarin käyttö, pikaohje


- ✓ Glukoositestiliuska: CareSens PRO
 - Liuskapurkki säilyy avattuna 12 kk tai erän viimeiseen käyttöpäivään.
 - Merkitse avauspäivämäärä purkin kylkeen.
 - ✓ Ketoainetestiliuska: KetoSens
 - Yksittäispakatut liuskat säilyvät erän viimeiseen käyttöpäivään.
1. Tunnista potilas.
 2. Lämmitä pistokohta.
 3. Aseta liuska (glukoosi tai ketoaine) mittariin. Mittari käynnistyy.
 4. Laite on valmis mittaamaan, kun näytölle tulee pisaran kuva.
 5. Puhdista näytteenottoa kohta ja kuivaa se (alkoholin annetaan haihtua).
 6. Tee ihopisto.
 7. Pyyhi ensimmäinen pisara pois.
 8. Imeytä toinen pisara liuskalle. Vie liuska pystyasennossa pisaran keskelle. Pidä pisarassa kunnes laite piippaa.
 9. Lue tulos näytöltä.
 10. Poista liuska käyttämällä liuskanvapautinta (mittarin takana).

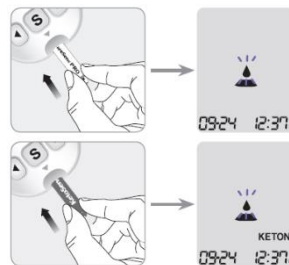

Tuloksen hakeminen muistista: Paina S-näppäintä (näyttöön tulee näkyville kuluvan päivän tulosten keskiarvo, ei siis viimeinen tulos). Paina nuoli oikealle (▶) (alareunassa lukee pvm ja kloaika, jolloin mittaus teyty), jolloin saat viimeisen tuloksen.

CareSens Dual – mittarin kontrollointi, pikaohje

- ✓ Glukoosikontrolli: CareSens PRO -kontrolliliuos
 - ✓ Ketoainekontrolli: KetoSens -kontrolliliuos
 - Kontrolli säilyy avattuna 3 kk huoneenlämmössä tai valmistuserän viimeiseen käyttöpäivään asti.
 - Merkitse avaamispäivä pullon kylkeen.
1. Työnnä testiliuska liuska-aukkoon. Odota, että näytölle tulee pisaran kuva.
 2. Aktivoi kontrollitestaustila painamalla "▶" -näppäintä 3 sek ajan: näytön oikeaan yläkulmaan tulee kontrollipullon kuva.
 3. Ravista kontrollipulloa rivakasti.
 4. Tipauta ensimmäinen tippa hukkaan. Pyyhi pullon kärki puhtaaksi tufferilla.
 5. Tipauta tippa kontrolliliuosta kontrollipullon korkin kärkeen.
 6. Kosketa testiliuskan kärjellä kontrollitippaa ja odota kunnes mittari piippaa.
 7. Merkitse tulos kontrollipäiväkirjaan.
 8. Vertaa tulosta kontrollin tavoiterajoihin. Rajat löytyvät liuskapurkin/paketin kyljestä (liuskaeräkohtaisia).
 9. Pyyhi pullon korkki puhtaaksi ja sulje se.

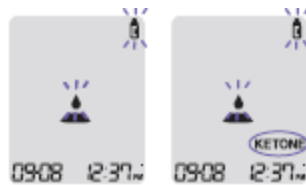

Tarkemmat ohjeet ja kontrollipäiväkirja löytyvät Fimlabin nettisivuilta ohjekirjasta: www.fimlab.fi → Ohjekirja → Lähetteet ja lomakkeet → Lomakkeet → Kontrollilomake/CareSens Dual ja PRO -liuska ja Kontrollilomake/CareSens Dual ja KetoSens -liuska