

CareSens Dual –mittari: KONTROLLIOHJE, Glukoosi

Kaikkien käytössä olevien mittareiden tulostasoa **tulee** tarkkailla säännöllisesti. Kontrollimittauksilla tarkistetaan laitteen ja liuskojen käyttökunto.

Suosittelut kontrollointitiheys:

Potilastestien lukumäärä	Kontrollointitiheys
Useita mittauksia päivässä	Päivittäin
Säännöllisesti viikoittain	1 x viikossa
Satunnaisesti	Aina potilasnäytteen yhteydessä tai 2 viikon välein säännöllisesti
Lisäksi	
Uuden liuskapurkin tai -erän käyttöönotossa	Tee kontrolli purkin 1. liuskalla.
Aina tulostasoa epäiltäessä	

Kuinka teen kontrollin?

1. Työnnä testiliuska liuska-aukkoon. Odota, että näytölle tulee pisaran kuva.
2. **Aktivoi kontrollitestaustila** painamalla ”▶” –näppäintä 3 sek ajan: näytön oikeaan yläkulmaan tulee kontrollipullon kuva.
3. Ravista kontrollipulloa rivakasti.
4. Tipauta ensimmäinen tippa hukkaan. Pyyhi pullon kärki puhtaaksi tufferilla.
5. Tipauta tippa kontrolliliuosta kontrollipullon korkin kärkeen.
6. Kosketa testiliuskan kärjellä kontrollitippaa ja odota kunnes mittari piippaa.
7. Merkitse tulos kontrollipäiväkirjaan.
8. Vertaa tulosta kontrollin tavoiterajoihin. Rajat löytyvät liuskapurkin kyljestä (liuskaeräkohtaisia).
9. Pyyhi pullon korkki puhtaaksi ja sulje se.

Mitä teen, jos kontrolli ei mene tavoiterajoihin?

- Kontrollitulosten kuuluisi pääsääntöisesti olla tavoiterajojen keskellä.
- Jos tulos menee tavoiterajojen ulkopuolelle, **toista mittaus**.
- Jos kontrollit ovat edelleen tavoiterajojen ylä- tai alapuolella tai säännönmukaisesti ylä- tai alarajalla, mieti missä vika voisi olla:
 - **Muistitko merkitä mittauksen kontrolliksi?**
 - Kontrollia ei saa säilyttää jääkaapissa! Sekoititko kontrollin ennen mittausa? Oliko korkin kärkeen kuivunut kontrollia edellisestä mittauskerrasta?
 - Milloin kontrollipullo on avattu ensimmäisen kerran? (Liuos säilyy avatussa pullossa 3 kk ajan tai viimeiseen käyttöpäivään huoneenlämmössä.)
 - Onko liuskat säilytetty oikein (1-30°C, suojassa auringonvalolta ja kuumuudelta)? Onko liuskapurkki ollut kiinni? Mikä on liuskojen viimeinen käyttöpäivä?
 - Näkyykö mittarin liuska-aukossa verta? Onko verta päässyt mittarin sisälle?
- Apua voit kysyä laboratoriosta: diabetes@fimlab.fi tai palvelukoordinaattori 050 4717598, vierianalytiikkakoordinaattori 050 4677481/050 4353105, vierianalytiikkahoitajat: Tays-alue 03 311 76905, Hatanpää 040 7797115, Valkeakoski 050 4631542, Sastamala 050 4631603, Jyväskylä 014 2695175, Hämeenlinna 03 629 227

KONTROLLIPÄIVÄKIRJA: GLUKOOSI CARESENS DUAL -MITTARILLA

Mittari: CareSens Dual, sarjanumero: _____

Glukoositestiliuska: CareSens PRO **Kontrolliliuos:** CareSens PRO verensokerin kontrolliliuos

Käyttöpaikka: _____

CareSens PRO -kontrollien tavoiterajat löytyvät käytössä olevan testiliuskapurkin kyljestä.
Kontrolli säilyy avattuna 3 kk huoneenlämmössä tai valmistuserän viimeiseen käyttöpäivään asti.

Muista aktivoida kontrollitestaustila painamalla ”▶”-näppäintä 3 sek ajan!

Pvm	Tekijä	L-kontrolli Tulokset (mmol/l)	L-kontrolli tavoiterajat ja lot numero	H-kontrolli Tulokset (mmol/l)	H-kontrolli tavoiterajat ja lot numero	Liuskaerän lot numero

Lomake säilytetään yksikössä yhden vuoden ajan.

Tulostettu: www.fimlab.fi → Ammattilaiselle → Diabetes-omamittauspalvelu → Laitteiden ohjeet → CareSens Dual