


FreeStyle Precision Neo H – mittarin käyttö, pikaohje

Glukoositestiliuska: FreeStyle Precision Neo H, yksittäispakatut liuskat, säilyvät erän viimeiseen käyttöpäivään.

1. Lämmitä pistokohta.
2. Jos avaat uuden liuskapakkauksen, käytä kalibrointiliuska laitteessa. Näytöllä näkyy lot XXXXX, sama lot eli eränumero tulee olla painettuna testiliuskan folioon (5 viimeistä numeroa).
3. Avaa testiliuskan foliokuori pykälän kohdalta. Aseta testiliuska mittariin. Mittari käynnistyy.
4. Laite on valmis mittaamaan, kun näytölle tulee pisaran kuva. **Varmista lot-numeron täsmävyys** (sama numero näytössä ja liuskan foliokuoressa).
5. Puhdista näytteenotto kohta ja odota kunnes iho on kuiva.
6. Tee ihopisto.
7. Pyyhi ensimmäinen pisara pois.
8. Imeytä toinen pisara liuskalle. Vie liuska noin 45°kulmassa pisaran keskelle. Pidä pisarassa kunnes näytöllä näkyy kolme lyhyttä viivaa ja 5 sekunnin mittausajan laskenta alkaa.
9. Lue tulos näytöltä.
10. Poista liuska.



Kalibrointi.

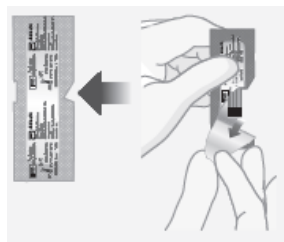

Repäise folio auki sivusta.

Tämä pää mittariin.



Mittari on valmis mittaukseen. Imeytä veri liuskalle.






- ✓ **Tuloksen hakeminen muistista:** Paina -näppäintä. Mittari käynnistyy. Paina näytöltä . Viimeisin tulos näkyy näytöllä ja sen alla on kellonaika. Jos tulos on aiemmalta päivältä, näkyy alla vuorotellen pvm ja kellonaika. ja -näppäimillä voit selata muistia.
- ✓ **Mittari sammuu** itsestään tai painamalla -näppäintä 3 sekunnin ajan.

FreeStyle Precision Neo H – mittarin kontrollointi, pikaohje

- ✓ Glukoosikontrolli: MediSense Glucose & Ketone Control Solutions Hi, Mid ja Lo –kontrolliliuos
- ✓ Kontrolli säilyy avattuna 90 päivää huoneenlämmössä. Merkitse avauspäivä pullon kylkeen.



1. Työnnä testiliuska liuska-aukkoon. Odota, että näytölle tulee pisaran kuva.
2. **Aktivoi kontrollitestaustila** painamalla -näppäintä 3 sekunnin ajan: näytölle tulee näkyviin pisaran lisäksi -merkki.
3. Ravista kontrollipulloa.
4. Tipauta ensimmäinen pisara hukkaan. Pyyhi pullon kärki puhtaaksi tufferilla.
5. Tipauta tippa kontrolliliuosta esim. folion päälle.
6. Kosketa testiliuskan kärjellä kontrollipisaraa ja odota kunnes näytöllä on kolme lyhyttä viivaa ja 5 sekunnin mittausajan laskenta alkaa.
7. Tulos ilmestyy näytölle. Merkitse tulos kontrollipäiväkirjaan.
8. Vertaa tulosta kontrollin tavoiterajoihin. Rajat löytyvät liuskapaketin pakkausliuskasta (liuskaeräkohtaisia). Jos tulos ei mene tavoitteeseen, katso tarkempi ohje kontrollin tekemisestä kontrollipäiväkirjan yhteydestä.
9. Poista liuska.

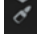Tarvittaessa saat kontrollitestaustilan pois päältä painamalla uudelleen -näppäintä tai poistamalla testiliuskan mittarista.

Kontrollitestaustilan merkki



Tarkemmat kontrolliohjeet ja kontrollipäiväkirja löytyvät Fimlabin nettisivuilta ohjekirjasta:

www.fimlab.fi → Ohjekirja → Lähetteet ja lomakkeet → Lomakkeet → Kontrollilomake/FreeStyle Neo H-liuska