


MINIMED™ 640G - VALIKKOKARTTA



Paina

Annostelun pysäytys
Ääniasetukset
Historia
Säiliö ja letku
Insuliiniasetukset
Sensorin asetukset
Tapahtumamerkit
Muistutukset
Apuohjelmat

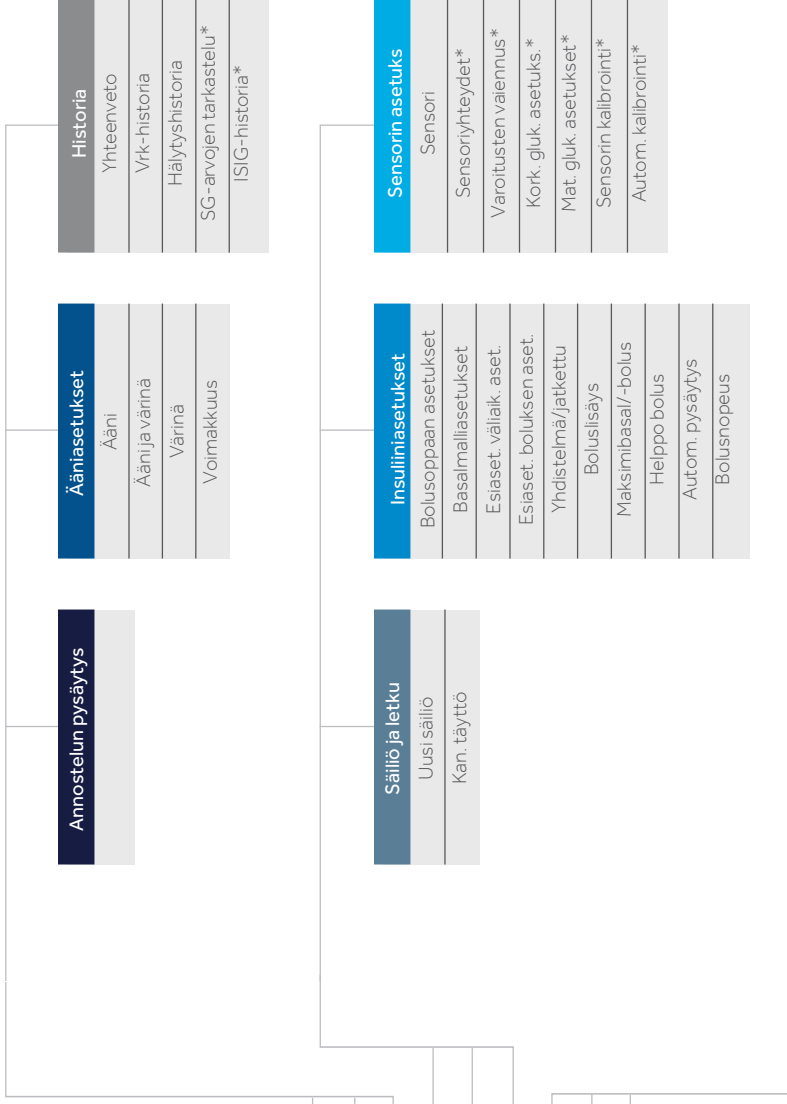

Perusnäyttö

SIIRTYMINEN

Voit avata valikon missä tahansa näytössä painamalla painiketta.
 Voit siirtyä valikossa alas- ja ylöspäin painamalla ja painikkeita.
 Voit avata valitsemasi valikkokohdan painamalla painiketta.
 Vientyspaikki tulee näkyviin, jos valikossa on näyttöä näkyvien kohtien lisäksi myös muita kohtia.

Voit siirtyä valikossa alaspäin ja tarkastella muita kohtia painamalla painiketta.
 Voit siirtyä valikossa takaisin ylös painamalla painiketta.

Voit palata takaisin edelliseen näkymään painamalla painiketta.
 Voit palata **perusnäyttöön** pitämällä painiketta painettuna.

*Käytettävissä vain, kun Sensori-toiminto on päällä.