



Lähettäjä:

Näytteenottoaika: _____

Vastausosoite: _____

Tutkittava:

Etunimi: _____

Sukunimi: _____

Henkilötunnus: _____ Mies
 Nainen

Lähettäjän näytteen numero: _____

Tapausnumero _____ (THL täyttää)

Näyte saapunut THL:ään _____ (THL täyttää)

Henkilötietotarralle paikka kääntöpuolella =>

Lääkäri/hoitajan nimi: _____ Puhelinnumero: _____

Epäilty tauti:

Tuhkarokko

Sikotauti

Vihurirokko

Oireiden alkupvm

Oirekuvaus:

Mahdollinen tartuntalähde:

Matkustusanamneesi viimeisen
kahden kuukauden ajalta:

MPR-rokotukset:

MPR I: pvm _____

MPR II: pvm _____

Muut:

Tuhkarokko: pvm _____

Sikotauti: pvm _____

Vihurirokko: pvm _____

Näytteet:

1. seerumi pvm _____

sylkinäyte pvm _____

nielunäyte pvm _____

2. seerumi pvm _____

muu pvm _____

(THL täyttää)

Näytteen numero _____

Näytteen numero _____

Näytteen numero _____

Näytteen numero _____

Näytteen numero _____

MPR-tautiepäilynäytteet tutkitaan maksutta.



paikka henkilötietotarralle

MPR-tutkimuksiin tarvittavat näytteet:

Näytteet säilytetään n. +4 asteessa ja lähetetään mahdollisimman pian Virologian yksikköön.

I-seerumi mielellään vähintään 2 ml.

Sylkinäyte otetaan mieluiten Virologian yksiköstä saatavilla näytteenottovälineillä puh: 029 524 6116.

Nielunäyte voidaan ottaa puuvillapäisellä vanutikulla tai muulla nielunäytteenottoon soveltuvalla tikulla.

II- seerumi otetaan 2-3 viikon kuluttua I-seerumista.

Jos kyseessä on pieni lapsi, pyydämme ottamaan ensisijaisesti seeruminäytteen ja jos mahdollista sylki- ja nielunäytteen.

Näytteiden lähettämisestä tulee sopia virologian yksikön kanssa etukäteen puh: 029 524 6116.

Lähete: "MPR-lähete" -lomake (käännä)
- täytä huolellisesti kaikki kohdat

Näytteiden lähetyks: - pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa
- pussit pakataan mielellään n. +4 asteen kylmäpakkaukseen
- kylmäpakkaukseen pakataan keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon
- laatikossa on oltava UN3373- sekä BIOLOGINEN MATERIAALI,
KATEGORIA B -tarrat (perustuu kansainvälisiin sääntöihin)
- lähettäjä maksaa postimaksun

HUOM: *Posti Oy kuljettaa laatikot maksikirjeenä, ILMAN pakettikorttia*
<http://posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf>

Lähetysosoite: THL
Virusinfektiot-yksikkö
PL 30
00271 HELSINKI

Tulokset: - tulokset vastataan kirjallisesti

Asiakaspalaute: Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme lähettämään sähköpostitse mprlabra@thl.fi