

Tuotetiedote maaliskuu 2024

RocheDiabetes Care Platform ohjelmistopäivitys ja alustan nimenmuutos

Työskentelemme Rochella jatkuvasti kehittääksemme tuotteitamme & palveluitamme ja haluamme ilmoittaa RocheDiabetes Care Platform tulevasta ohjelmistopäivityksestä ja nimenmuutoksesta.

RocheDiabetes Care Platform päivittyy kahdessa osassa keväällä 2024

Ensimmäinen päivitys 11.4.2024

RocheDiabetes Care Platform päivittyy versioon 2.9.

Suurimmat muutokset ovat uusi Accu-Chek -tili ja Web DeviceLink

Accu-Chek -tili


mySugr -tili muuttuu Accu-Chek -tiliksi, joka mahdollistaa helpon tiedonjaon useiden hoitoyksiköiden kanssa. Uuden tilin luominen on diabeetikolle helpompaa ja sisältää vähemmän eri vaiheita. Potilaan kutsuminen jakamaan tietoja terveydenhuollon ammattilaisen toimesta muuttuu myös helpommaksi.

Web DeviceLink

Uusi Web DeviceLink verensokerimittarin purkua varten, jota ei tarvitse jatkossa päivittää, kun se on kerran asennettu.

Toinen päivitys myöhemmin keväällä 2024

RocheDiabetes Care päivittyy versioon Accu-Chek Care 1.0. Näkyvin muutos on alustan uusi nimi Accu-Chek Care ja samalla alustan ulkoasu päivitetään.

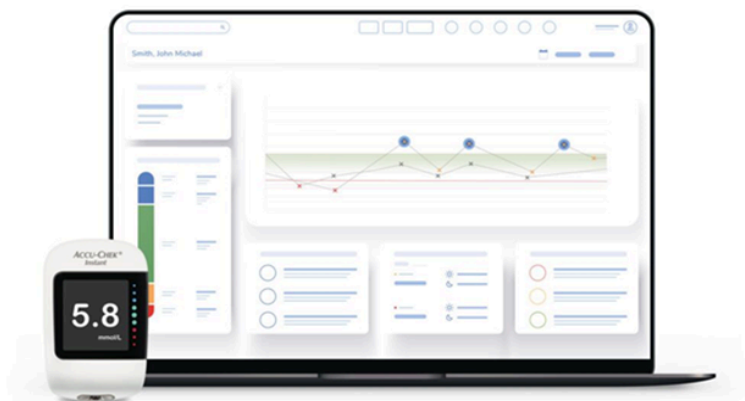

Kuinka kutsut potilaan jakamaan tietoja?

Ohje terveydenhuollon ammattilaiselle:


1. Aloita potilaan kutsuminen jakamaan verensokerimittaustietoja valitsemalla potilaan nimen vieressä olevasta alavetovalikosta ”Yhdistä ja muokkaa”

2. Kirjoita *Jakamiskoodi*-kenttään potilaan antama koodi mySugar -sovelluksesta

Syötä potilaan antama jakamiskoodi ja klikkaa *Tarkista*

3. Vahvista potilaan nimi ja sähköpostiosoite. Tietojen ollessa oikein klikkaa *Connect*

Muodosta yhteys potilaaseen?



Roche Testi
[redacted]@roche.com


Tämän potilaan terveystiedot ovat jaettavissa.

Peruuta
Connect

4. Tarkista potilaan Pakolliset tiedot ja klikkaa *Jatka*

1 Pakolliset tiedot

Etinimi * Sukunimi tai sukunimet *

Syntymäaika * 

Kutsu potilas käyttämään mySugr-sovellusta diabeteksen hallintaan

Sähköposti *

Jatka


5. Valinnaiset tiedot näytössä vieritä alas ja klikkaa *Luo potilas*


2 Valinnaiset tiedot

Terveys

Terveystietotunnus

Diabetestyyppi Hoito

Diagnosointipäivämäärä 

Hoitohenkilökunta * 

Henkilökohtainen

Kieli Syntymähetkellä määritetty sukupuoli

Puhelinnumero

Tiän määritykset

RPM-ohjelma
Paranna vuorovaikutusta ja viestintää potilaan kanssa ja määritä etäkäynnit.


Avraa yhteys
Salli potilaasi ladata järjestelmään tietoa kaikista tuetuista laite-merkeistä.

Liuskojen hallinta
Hallitse testiäsiä valitsemalla seuraavista roudo keskustusta tai kotikäyttöä.


Luo potilas

Ohje potilaalle:


1. Avaa mySugr-sovellus ja valitse *Lisää*

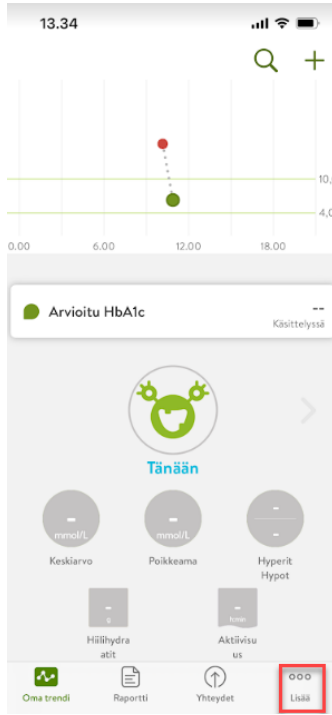

2. Valitse Tietojen jakaminen

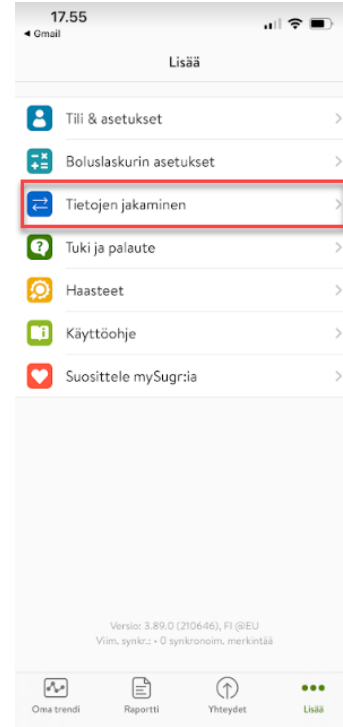

3. Avautuvasta näytöstä klikkaa *Luo koodi*

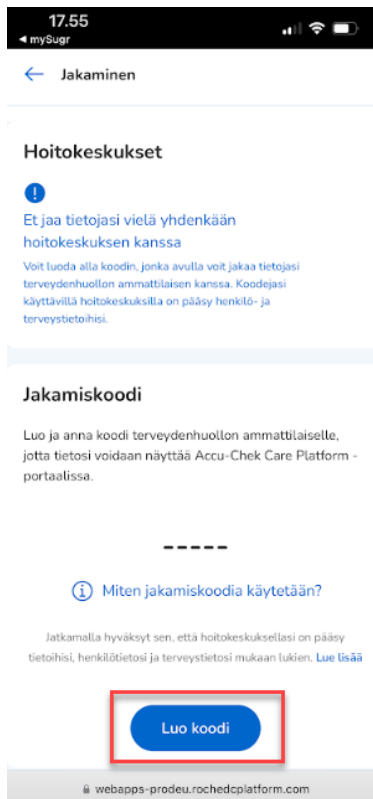

4. Anna jakamiskoodi ammattilaiselle

Jakamiskoodi

Luo ja anna koodi terveydenhuollon ammattilaiselle, jotta tietosi voidaan näyttää Accu-Chek Care Platform -portaalissa.

mvvjz

i Miten jakamiskoodia käytetään?


Jatkamalla hyväksyt sen, että hoitokeskuksellasi on pääsy tietoihisi, henkilötietosi ja terveystietosi mukaan lukien. **Lue lisää**

Luo koodi uudelleen


webapps-prodeu.rochedcplatform.com

Mikäli haluat lopettaa tietojen jakamisen toimi seuraavasti:


1. Avaa mySugr-sovellus ja valitse *Lisää*

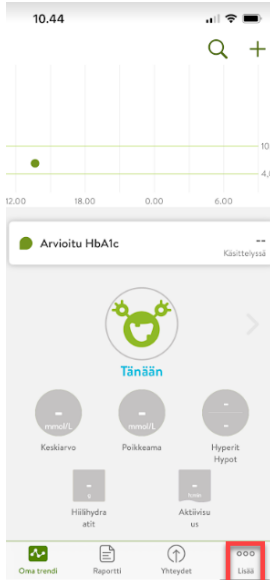

2. Valitse Tietojen jakaminen

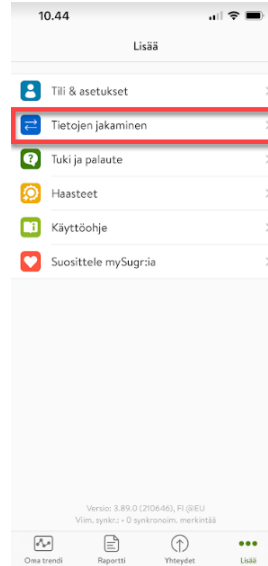


3. Klikkaa Hoitokeskukset kohdassa

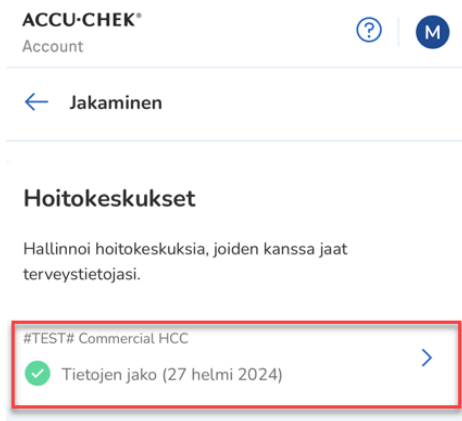


Jakamiskoodi

Luo ja anna koodi terveydenhuollon ammattilaiselle, jotta tietosi voidaan näyttää Accu-Chek Care Platform -portaalissa.

4. Klikkaa ”Keskeytä tietojen jako”

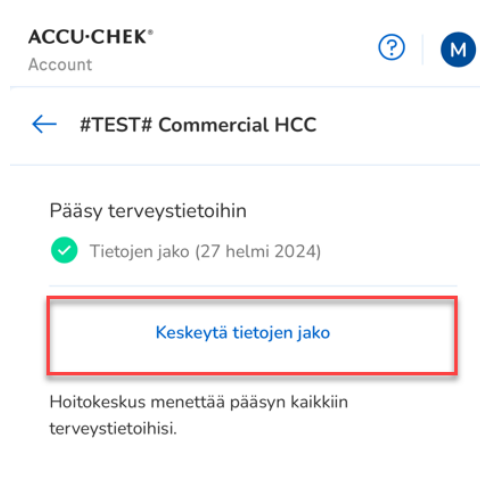

5. Valitse ”Keskeytä tietojen jakaminen”

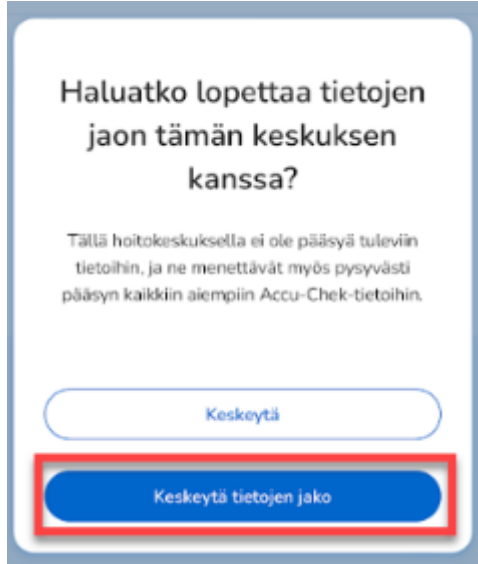

Nyt sovelluksessa näkyy ajankohta, jolloin tietojen jakaminen on keskeytynyt.

