

# MiniMed™ 740G -järjestelmä

## Valikkokartta



Paina




|                    |
|--------------------|
| Pysäytä annostelu  |
| Ääniasetukset      |
| Historia           |
| Säiliö ja letku    |
| Insuliiniasetukset |
| Sensorin asetukset |
| Tapahtumamerkit    |
| Muistutukset       |
| Apuohjelmat        |

|                          |                           |                           |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Pysäytä annostelu</b> | <b>Ääniasetukset</b>      | <b>Historia</b>           |
|                          | Ääni (On/Ei)              | Yhteenveto                |
|                          | Ääni ja värinä (On/Ei)    | Vrk-historia              |
|                          | Värinä (On/Ei)            | Hälytyshistoria           |
|                          | Voimakkuus (-/+)          | SG-arvojen tarkastelu*    |
|                          |                           | ISIG-historia*            |
| <b>Säiliö ja letku</b>   | <b>Insuliiniasetukset</b> | <b>Sensorin asetukset</b> |
| Uusi säiliö              | Bolusoppaan asetukset     | Sensori                   |
| Kanyylin täyttö          | Basalmalliasetukset       | Sensoryhteydet*           |
|                          | Esiaset. väliaik. aset.   | Varoitusten vaiennus*     |
|                          | Esiaset. boluksen aset.   | Kork. gluk. asetukset*    |
|                          | Yhdistelmä/jatkettu       | Mat. gluk. asetukset*     |
|                          | Boluslisäys               | Sensorin kalibrointi*     |
|                          | Maksimibasal/-bolus       |                           |
|                          | Helppo bolus              |                           |
|                          | Autom. pysäytys           |                           |
|                          | Bolusnopeus               |                           |
| <b>Tapahtumamerkit</b>   | <b>Muistutukset</b>       | <b>Apuohjelmat</b>        |
| VS                       | Henkilökohtainen          | Näyttöasetukset           |
| Pistos                   | Bolus-VS-tarkistus        | Aika ja päivämäärä        |
| Ateria                   | Unoht. ateriabolus        | Lukitus                   |
| Liikunta                 | Vajaa säiliö              | Itsetestaus               |
| Muu                      | Setin vaihto              | HH-yksikkö                |
|                          | Kalibrointi*              | Asetusten hallinta        |
|                          |                           | Sensoridemo               |
|                          |                           | Laitevaihtoehdot          |
|                          |                           | CareLink                  |
|                          |                           | Kieli                     |


### Valikossa liikkuminen

Paina  missä tahansa näytössä avataksesi valikon.

Paina  tai  siirtyäksesi valikossa alas- ja ylöspäin.

Paina  avataksesi valitsemasi valikkokohtaan.

Vierityspalkki tulee näkyviin oikeaan reunaan, jos lisää tekstiä on saatavilla.

Paina  selataksesi alaspäin ja nähdäksesi lisätekstin.

Paina  palataksesi takaisin ylös.

Paina  siirtyäksesi edelliseen näyttöön. Pidä  painettuna palataksesi perusnäyttöön.

Medtronic Finland Oy  
Lentäjätie 3  
01530 Vantaa  
Puh: +358 20 7281 200  
Faksi: +358 20 7281 201

FI-IPT-2200021 © Medtronic 2022.

Kaikki oikeudet pidätetään. Medtronic ja Medtronic-logo ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä.™™ Kolmansien osapuolien tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit ovat jonkin Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä. Tämän materiaalin sisältämiä tietoja ei tule pitää lääketieteellisinä neuvoina eivätkä ne korvaa keskustelua lääkärin kanssa. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varoitoimista, mahdollisista haittatapahtumista ja muista asioista.

\*Käytettävissä vain, kun sensoritoiminto on kytketty päälle.